

## Navina Classic Produktinformation

### Användning

Navina Classic är avsedd att användas för transanal irrigering genom att tillföra vatten till nedre delen av kolon genom en rektalkateter.

### Indikationer för användning

Navina Classic är indikerad för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum).

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems.
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen.
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person och får inte delas av flera.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.

### Kontraindikationer

Använd inte Navina™ Classic system om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis.
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter.

### Navina Classic System

Art. nr	Produkt	Innehåll
6900510	Navina Classic System Regular * Endast för vuxna	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Regular* 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6900710	Navina Classic System Small Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Small 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901710	Navina Classic System Kona Från 3 år	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset



## Navina Classic System Förbrukningsartiklar

Art. nr	Produkt	Innehåll	Tekniska detaljer
6900610	Navina Classic System Regular refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Regular*	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6900810	Navina Classic System Small refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Navina rektalkatetrar Small	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskatetrar.
6901810	Navina Classic System Kona refill	1 Navina Classic kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor	100 användningstillfällen 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala 100 användningstillfällen Hydrofila, engångskonor.
6900310	Förbrukningsset Regular	1 Vattenbehållare  15 rektalkatetrar Regular*	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6900410	Förbrukningsset Small	1 Vattenbehållare  15 Navina rektalkatetrar Small	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskatetrar.
6901610	Förbrukningsset Kona	1 Vattenbehållare  15 Konor	15 användningstillfällen. 1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala Hydrofila, engångskonor.
6894010	Rektalkateterset Regular*	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6894310	Rektalkateterset Small	10 katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6901110	Slangset	1 Slang till kateter/kona 1 slang till Vattenbehållare	100 användningstillfällen. 100 användningstillfällen.
6901200	Tillbehörsset	2 greppringar(1 vertikal, 1 horisontell) 1 nackband 1 fästrem 1 fästklämma till Navina Classic kontrollenheten	
6901310	Navina Classic kontrollenhet	1 Navina Classic kontrollenhet	100 användningstillfällen

\* Endast för vuxna  
Alla Navina Classic-komponenter skall kasseras som hushållsavfall.

wellspect.se

