

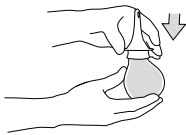

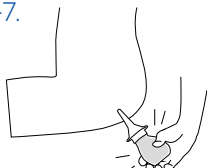


QUICK GUIDE NAVINA MINI


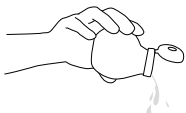


Förberedelser:

-  1. Öppna locket och fyll hela vattenbehållaren med ljummet (36-38° C) kranvatten.
-  2. Stäng locket.
-  3. Öppna påsen och anslut konan till vattenbehållaren.
-  4. Aktivera den hala ytan på konan genom att väta den med kranvatten.

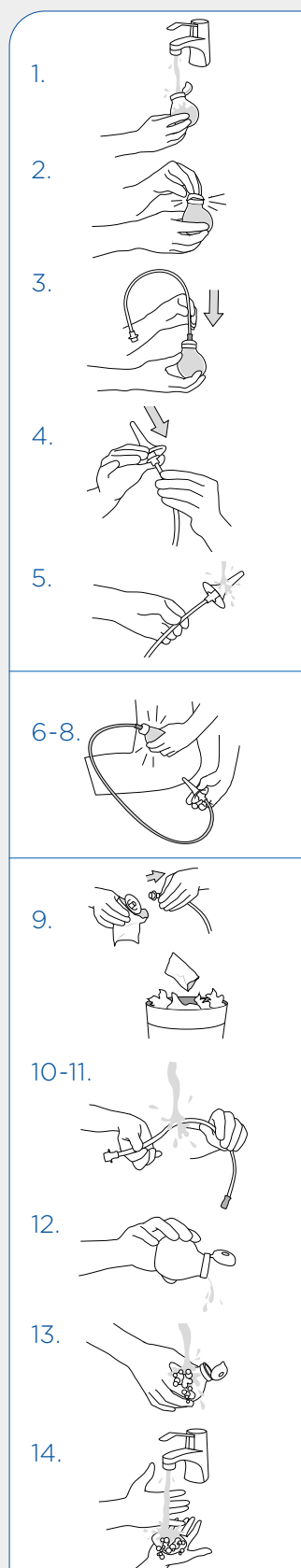
Instillation:

-  5-7. 5. Sitt på eller stå över toaletten och för försiktigt in konan i rektum. 6. När konan är på plats, kläm försiktigt på vattenbehållaren för att instillera vattnet. Tänk på att bara föra in den spetsiga delen av konan och stanna när du kommer till den bredare basen. 7. Drag ut konan och låt tarmen tömmas.

Isärtagning och rengöring

-  8. Lägg tillbaka konan i påsen och släng som hushållsavfall.
-  9. Öppna locket på vattenbehållaren och töm ut resterande vatten.
-  10. Rengör försiktigt vattenbehållaren efter varje användning med enbart ljummet tvålatten. Låt torka.
-  11. Tvätta händerna.

QUICK GUIDE NAVINA MINI MED FÖRLÄNGNINGSSLANG



Förberedelser:

1. Öppna locket och fyll hela vattenbehållaren med ljummet (36-38° C) kranvatten.
2. Stäng locket.
3. Anslut förlängningsslangen till vattenbehållaren.
4. Öppna påsen och anslut konan till förlängningsslangen.
5. Aktivera den hala ytan på konan genom att väta den med kranvatten.

Instillation:

6. Sitt på eller stå över toaletten och för försiktigt in konan i rektum.
7. När konan är på plats, kläm försiktigt på vattenbehållaren för att instillera vattnet. Tänk på att bara föra in den spetsiga delen av konan och stanna när du kommer till den bredare basen.
8. Drag ut konan och låt tarmen tömmas.

Isärtagning och rengöring

9. Lägg tillbaka konan i påsen och släng som hushållsavfall.
10. Montera isär förlängningsslangen och vattenbehållaren.
11. Rengör förlängningsslangen genom att skölja den med enbart ljummet tvålsvatten och låt torka.
12. Öppna locket på vattenbehållaren och töm ut resterande vatten.
13. Rengör försiktigt vattenbehållaren efter varje användning med enbart ljummet tvålsvatten. Låt torka.
14. Tvätta händerna

Navina Mini - För fullständiga instruktioner besök: ifu.wellspect.com